



Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!

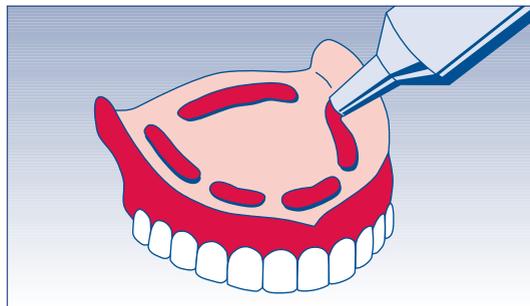

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme Extra Stark

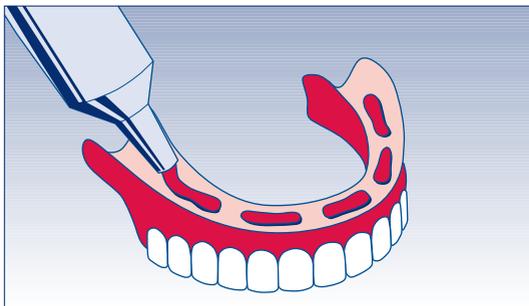

Anwendung

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme Extra-Stark enthält:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin, Methyl-4-hydroxybenzoat.


Queisser
PHARMA



D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Bei Fragen, Problemen oder Anregungen zum Thema Haftmittel schreiben Sie an **Queisser Pharma, Protefix®** Beratungsteam, D-24914 Flensburg. Oder im Internet unter www.protefix.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes
 weil die Prothese sicher und lange haftet
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese aufragen kann

Kommen Sie mit der neuen Tube gut zurecht?

- Ja Nein, weil

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und
verwende **Protefix®** Haft-Creme seit _____ Jahren.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information erhoben, verwendet und genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte mit Ausnahme von Tochtergesellschaften von Queisser Pharma ist ausgeschlossen.

Datum / Unterschrift _____

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: Queisser Pharma, D-24914 Flensburg. Wir nutzen Ihre Angaben streng **vertraulich** zur ständigen Produkt-Verbesserung. Bei Anfragen Ihrerseits setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Wenn Ihnen die telefonische Beantwortung recht ist, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel

Protefix® Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspangen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestер) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnspange oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



Protefix® Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN-Nr.: 2 651 753.